

Руководство по эксплуатации

17 дюймовое мультимедийное устройство с USB диском (опция)



USB накопитель (опция)
USB для проигрывания
HD изображения
WiFi

1.1 Описание продукта

Спасибо за выбор нашего товара. 17 дюймовое мультимедийное устройство с USB диском(опция) – это все мультимедиа в одном устройстве, которое сочетает в себе оптический многоплёночный объектив, SONY ¼ CCD, источник холодного света, и белый светодиод, а также накопитель изображений на U-диске, и мультимедийная связь доктор-пациент. Встроенная операционная система проста и лаконична в использовании. Система поддерживает USB диск. Преимущество комплекса в удобном сравнении снимков ДО и ПОСЛЕ лечения благодаря стоп-кадру с четырьмя ячейками.

1.2 Аксессуары

Камера 1

Кабели данных 1

Держатель камеры


ИК пульт управления 1

Мультимедиа монитор 1

Кронштейн 1

USB диск 1(опция)

Кабель питания 1

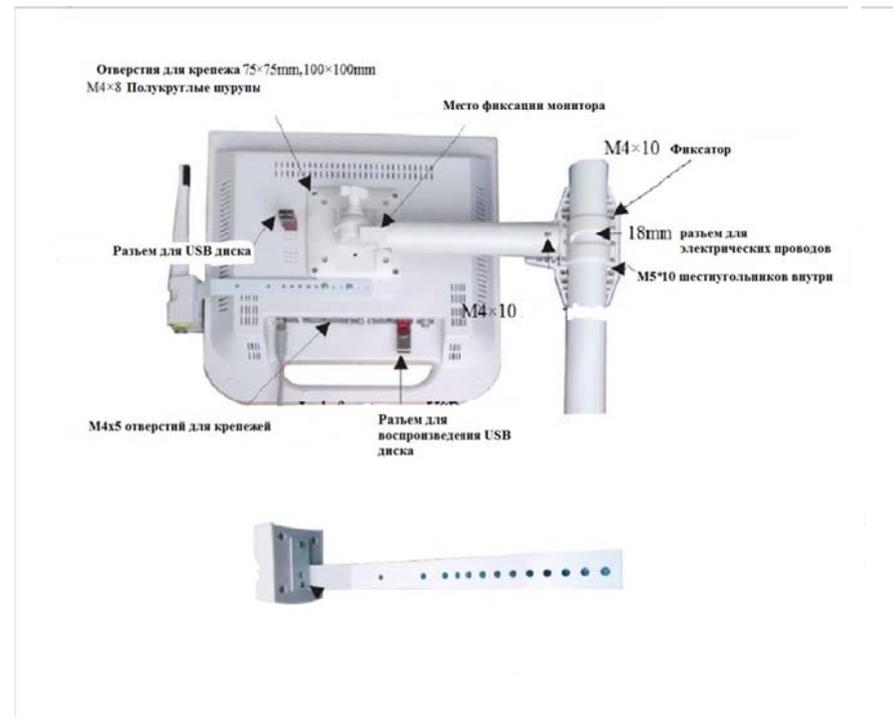

1.3 Характеристики товара и технические параметры


Система	Встроенная операционная система
Режим дисплея	Одно изображение, четыре изображения
Интеллектуальная функция	
VGA разрешение	1 280*1 024
Операционная система	ИК дистанционное управление
Метод резервирования	Самосохранение на USB диск
Объем хранения данных	32 Гб
Энергоемкость	30 Вт

Формат сохранения изображения	Jpg, размер:1 280*1 024
Режим раздачи WiFi	
Диапазон фокусировки	5 мм-50 мм
Количество сохраняющихся снимков	6 000

Взаимодействие доктор-пациент более эффективно и удобно с визуальной информацией. С 2 Гб информации и 6 Гб доступной информации. Вы можете так загрузить свой любимый фильм или музыку.

Доступ к мультимедиа включает в себя: ИЗОБРАЖЕНИЯ, ТЕКСТ,ВИДЕО,МУЗЫКУ. Формат изображения – JPG. Формат видео: MP4, AVI, MPG. Формат музыки MP3

8 Гб диск включает в себя: Операционную систему для стоматологов, Операционную систему управления для стоматологов.

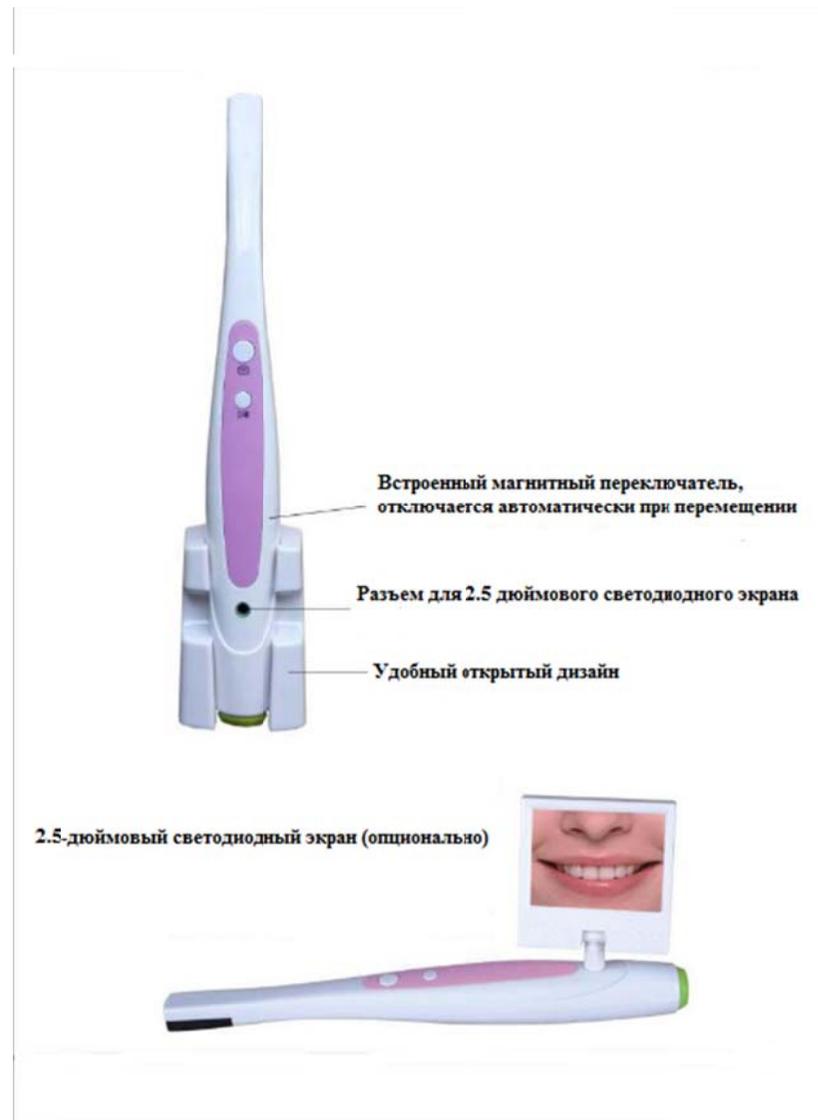

2.2 Руководство по использованию

1. Поставьте устройство в режим АС, подождите 10 секунд, пока на устройстве не загорится зеленый индикатор.
2. Нажмите кнопку ACCESS на пульте управления, выберите TV/VIDEO/HDMI/COMPUTER/MULTIMEDIA или нажмите кнопку MENU на передней панели для входа в меню. Нажмите AUTO для выбора TV/VIDEO/HDMI/COMPUTER/MULTIMEDIA и подтвердите.
3. Мультимедиа доступ включает в себя: ИЗОБРАЖЕНИЯ, ТЕКСТ,ВИДЕО,МУЗЫКУ. Формат изображения – JPG. Формат видео: MP4, AVI, MPG. Формат музыки MP3
4. Вы можете подключать и отключать USB диск, не прерывая подачу питания.
5. Вы можете хранить около 6 000 изображений в формате JPG с разрешением 1280*1024.
- 6.USB диск на 8 Гб позволяет хранить изображения, которые доступны к чтению на компьютере. Простое программное обеспечение для стоматологов создано для управления одним устройством, в то время как операционная система управления предназначена для управления сетевым резервированием.
7. Рекомендуется вставлять или вынимать мультимедийный U-диск без подключения к питанию.

2.3 Дистанционный пульт управления.



2.3.1


Нажмите кнопку INPUT, на экране Вы увидите TV/VIDEO/HDMI/COMPUTER/MULTIMEDIA, выберите COMPUTER, а затем Oral camera. В разделе MULTIMEDIA появятся разделы image/MUSIC/VIDEO/TEXT выберите VIDEO, включите видео базу данных доктор-пациент.

2.3.2

Используйте дистанционный пульт управления, выберите MULTIMEDIA для просмотра изображений, Вы найдете руководство по использованию в формате JPG.

2.4 Выбор канала

Нажмите клавишу INPUT для выбора канала

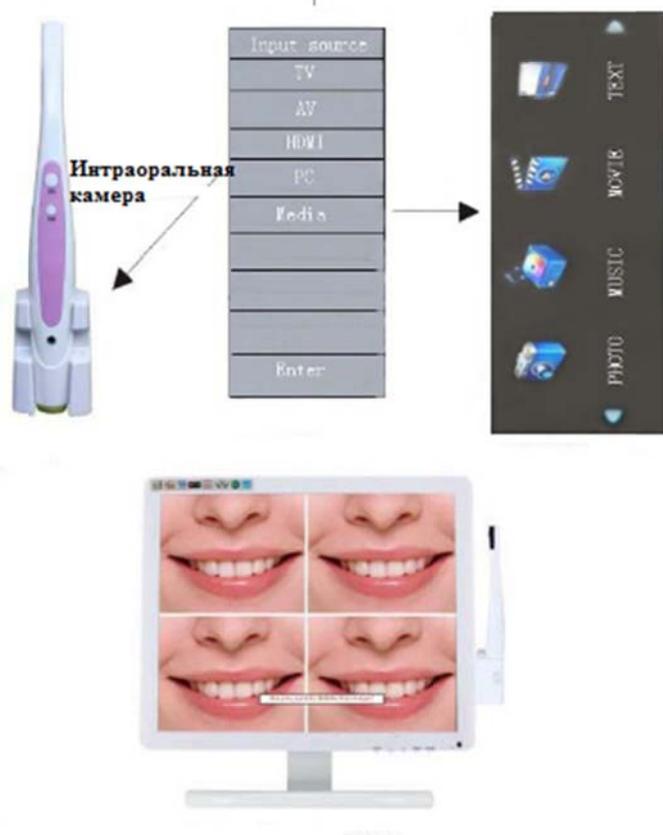

2.4 Удаление изображений

Для удаления изображений есть два способа: первый – удаление с помощью пульта управления, второй – с помощью клавиши 2 на ручной настройке. Для удаления сохраненного изображения нажмите клавишу 2, затем можете удалять изображения. Руководство по использованию: Вы увидите надпись ARE YOU SURE TO DELETE THE IMAGE, нажмите клавишу 2 и изображение будет удалено.

3.0 Устранение проблем

Ошибка	Метод выявления проблемы
При включении переключателя (ON/OFF) нет ответа на устройстве.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, включена ли вилка в розетку 2. Проверьте подключены ли все провода
Изображение слегка размыто во время использования	Если устройство включено в первый раз, то это вход в обычный рабочий режим и спустя немного времени изображение стабилизируется.
Изображение во время стоп-кадра	Во время стоп-кадра ручка должна быть статична для четкости изображения.
Появление пятен на изображениях	<p>Проверьте, нет ли пятен на самом экране.</p> <p>Проверьте, нет ли пятен на защитном стекле.</p> <p>Если проблема не вызвана вышеуказанными причинами, то обратитесь к своему дистрибьютору или производителю.</p>

Нет данных на диске USB	USB диск поврежден
Черный экран, нет сигнала	Инвертор или плата повреждены

4. Меры предосторожности:

Внимательно ознакомьтесь с нижеописанными предупреждениями данного руководства перед использованием, и сохраните его для дальнейшего использования.

4.1 Не касайтесь сигнального соединителя острыми предметами, металлом и не проливайте жидкость во избежание короткого замыкания или повреждения товара.

Если Вы не используете прибор какое-то время, отключите от сети питания.

Не разбирать устройство самостоятельно во избежание повреждений.

Не оказывать давление на устройство.

4.2 Поддача тока

Используйте только предназначенной мощности трансформатор, предоставленный производителем во избежание повреждения устройства.

Не использовать товар при каких-либо повреждениях силового кабеля или сигнального коннектора.

Не ставить на силовой кабель или сигнальный коннектор какой-либо груз.

Не помещайте силовой кабель или сигнальный коннектор во влажную среду.

4.3 Соответствующая среда

Поместите устройство в сухое и проветриваемое место.

Не устанавливайте устройство в помещение с чрезвычайно низкой или высокой температурой, повышенной влажностью, с попаданием прямых солнечных лучей или с обилием пыли.



18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Покупатель _____

Продавец _____

Наименование
изделия _____

Тип, модель,
цвет _____

Дата постановки на гарантийное обслуживание _____

Серийный номер
изделия _____

Срок гарантии на
изделие _____

Дополнительные
опции _____

Срок гарантии на дополнительное
оборудование _____

Серийный номер дополнительного
оборудования _____

Продавец (адрес,
телефон) _____

М.П.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные
неправильным использованием оборудования или нарушением
эксплуатации.